

Pansamente Water-Jel (cu gel pe bază de apă) – Instrucțiuni de folosire

Text original tradus în toate limbile

Română	
Pansamente pentru arsuri pentru prim ajutor/urgență	
Instrucțiuni de folosire	
1. Se taie deschizătura pachetului și se scoate pansamentul	
2. Se aplică imediat pansamentul pe zona arsurii	
3. Se acoperă zona arsurii fără a se apăsa	
4. Se solicită intervenția personalului medical	
Atenție:	
Nu se folosește pansamentul dacă pachetul în care a fost depozitat a fost găsit deschis sau distrus!	
	© 2001-2004 Water-Jel Europe LLP.